

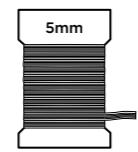



# Ansiktsvisir

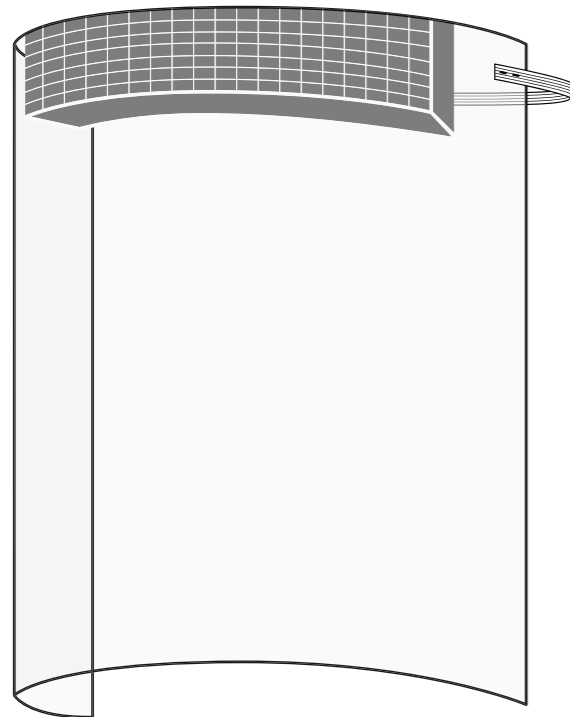


Resårband  
(5mm bredd)

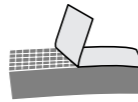

Skumgummlist  
(30x30x200)

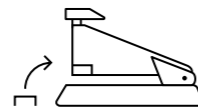


Häftklammer  
(standard 26/6)

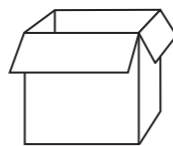

Lådor till att packa




A4 OH-papper

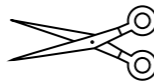

Sax



Tejp för att fästa  
mallarna på bordet

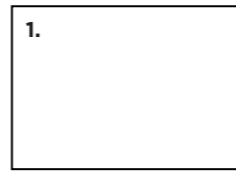

A3 mallar x 5  
(utskrivna i verlig storlek)

## Innan ni börjar:




Bara de som känner sig helt friska kan delta




### Det är viktigt att:

- bära ett munskydd
- städa och desinficera bord, häftapparat och sax
- tvätta händerna med tvål och att använda handsprit

1.

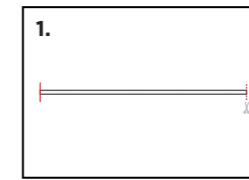

+

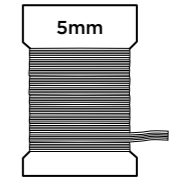


+



Klipp resårbandet (36 cm)


2.

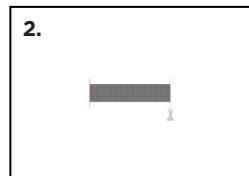

+



+

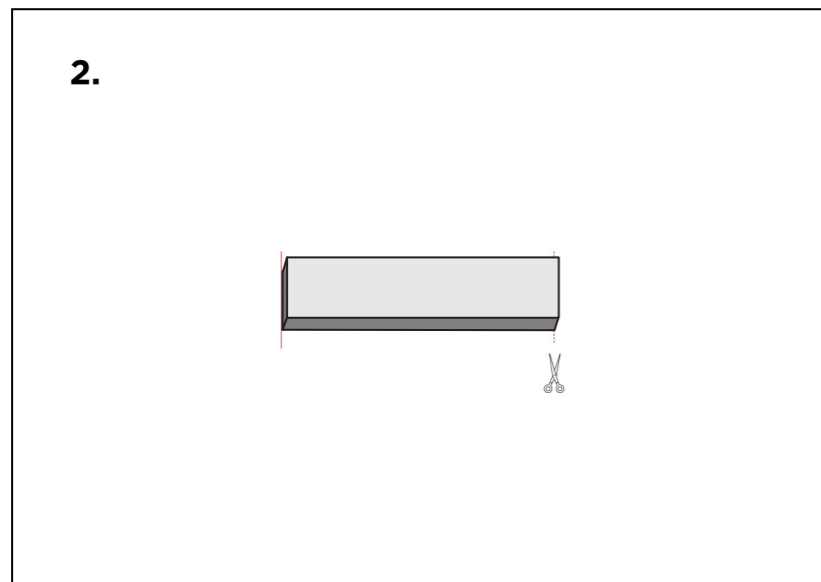

Klipp skumgummit (14 cm)



3.



+




+

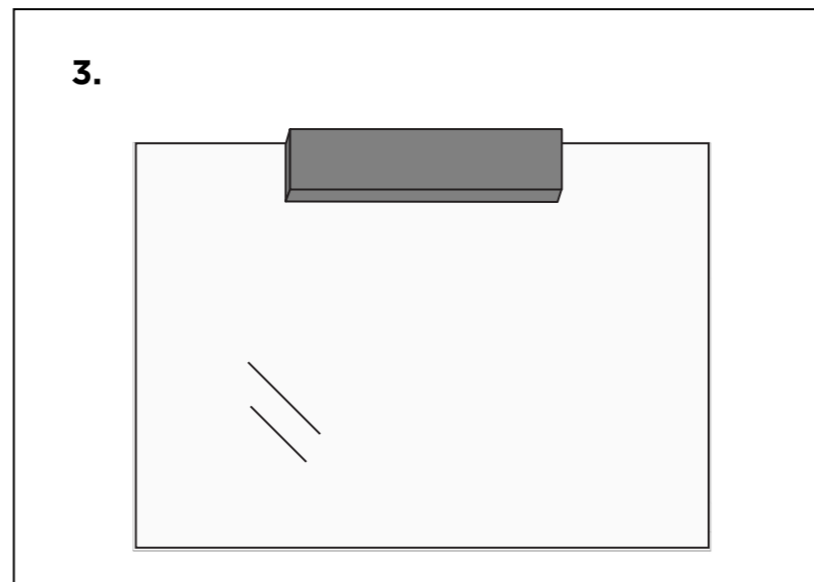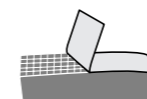


Klistra fast skumgummit på A4 OH-papper



4.

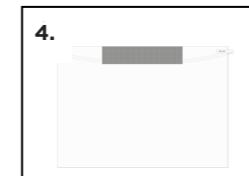

+

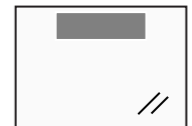

+

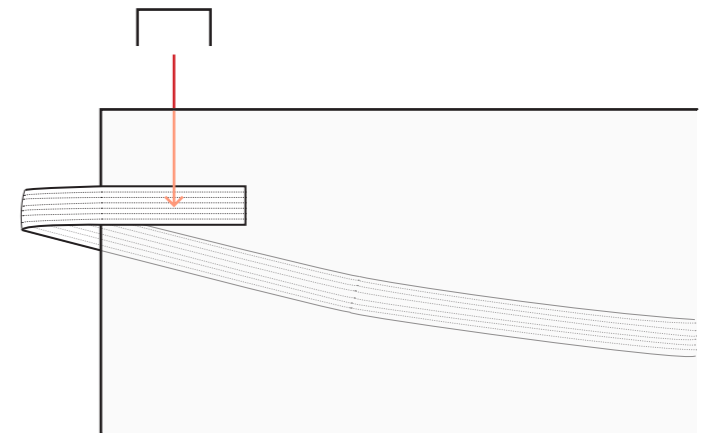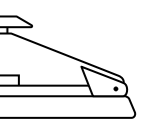


Häfta resårbandet på A4 OH-papper

5.

Kontrollera ansiktsvisiret genom att titta så häftklamrarna sitter ordentligt, dra även i resårbandet och säkerställ att det sitter kvar.


1.

Använd denna mall för att klippa resårbandet i rätt längd

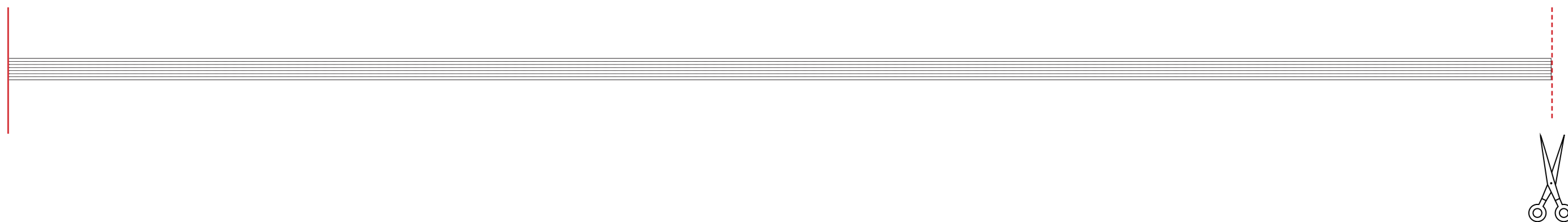


# 2.

Använd denna mall för att klippa skumgummlisten i rätt längd

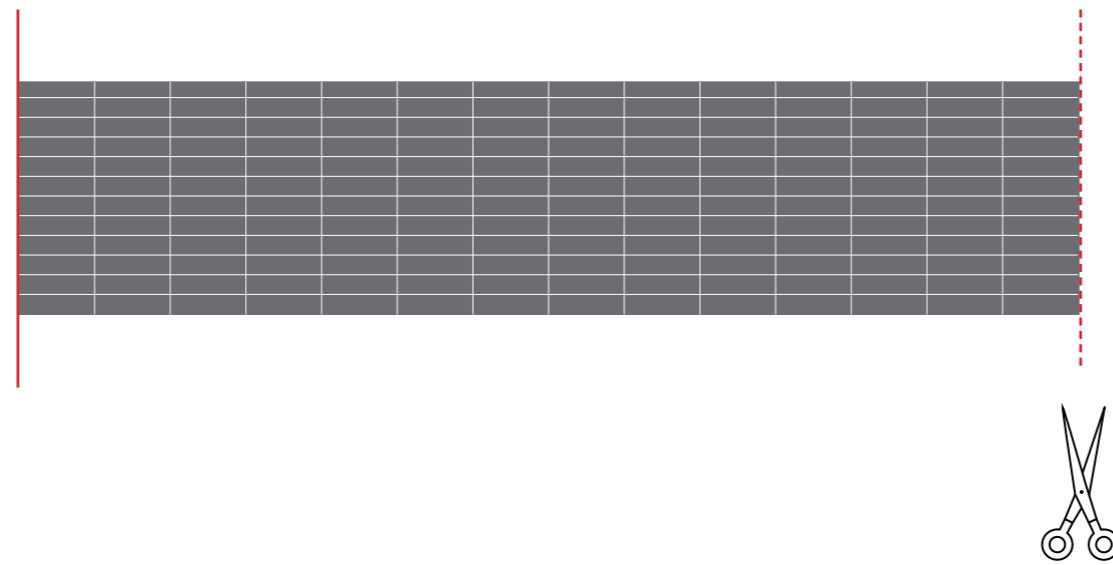


# 3.

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Använd denna mall för att klistra fast skumgummilisten på OH-pappret



# 4. Fäst resårbandet på utsidan av OH-pappret genom att häfta från insidan (inte för nära kanterna)

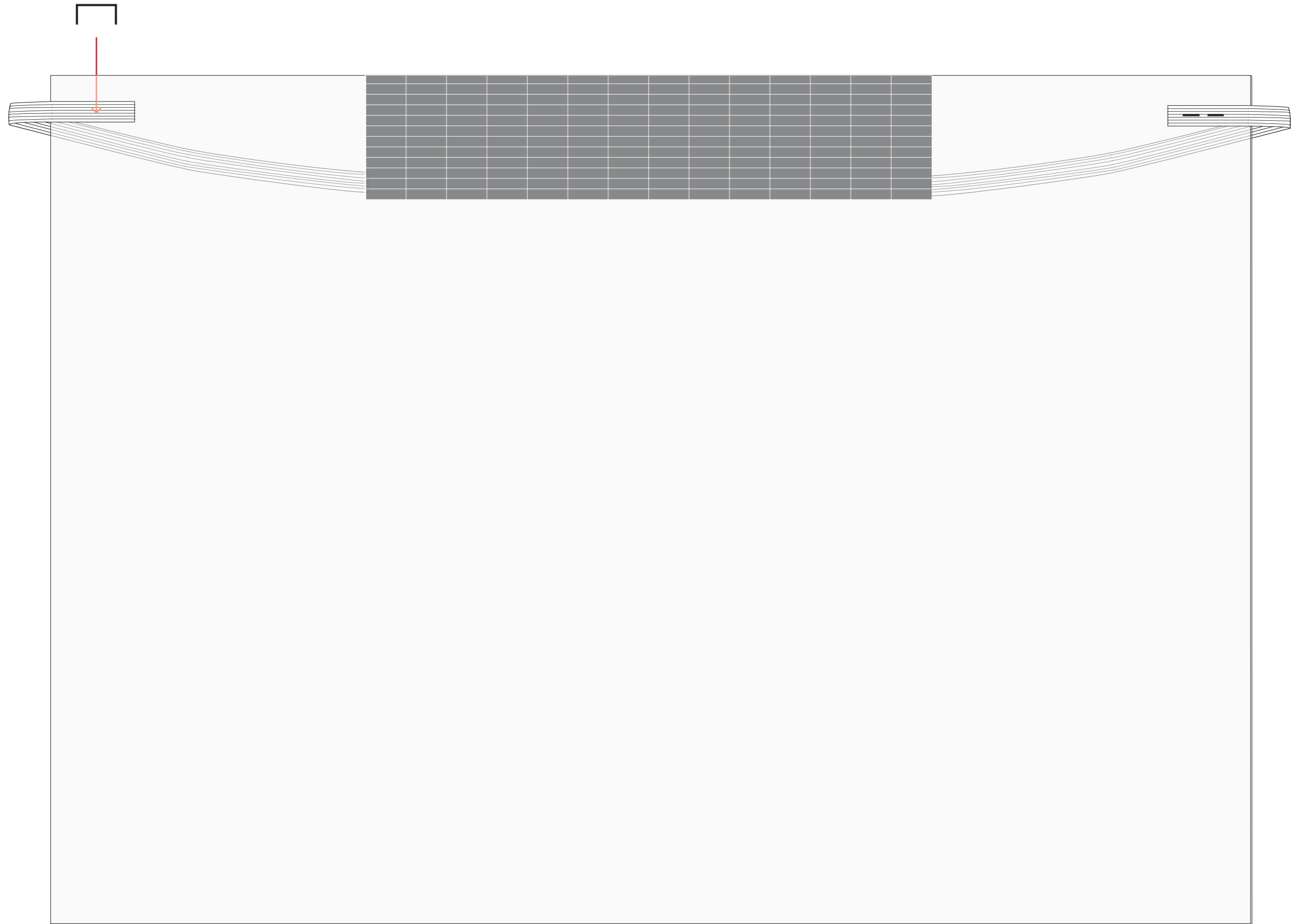

# 5.

Innan du packar, kontrollera ansiktsvisiret genom att titta så häftklamrarna sitter ordentligt, dra även i resårbandet och säkerställ att det sitter kvar

